



FLÄCHEN-  
DESINFIZIERUNGSMITTEL

# Blanchipon®

Universal-Reinigungskonzentrat für Medizinprodukte  
(für feuchtigkeitsbeständige Flächen und Gegenstände)

détergent concentré à usage universel  
pour les dispositifs médicaux  
(pour surfaces et objets lavables)



# Produktinformation

Bitte sorgfältig lesen!

## Blanchipon®

Konzentrat  
Zur gewerblichen Verwendung.

## ZUSAMMENSETZUNG

Anionische Tenside (15–30 %)

## ANWENDUNGSGEBIETE

- Reinigung von nasswischbaren Flächen aller Art, wie z. B. textiltreie Fußböden, Treppen, Flure, Wände, Kacheln, Türen, Fensterrahmen, Heizkörper, Inventar und Geräte, sanitäre Einrichtungen, Kühlschränke u. a.
- auch für den Küchenbereich

## ART DER ANWENDUNG/DOSIERUNGSANLEITUNG

**Blanchipon®** ist ein flüssiges Konzentrat, mit dem jede gewünschte Gebrauchsverdünnung durch Zugabe von Wasser hergestellt werden kann. Immer erst Wasser einfüllen und dann **Blanchipon®** zugeben.

### Flächen-Reinigung

bei normaler, auch angetrockneter Verschmutzung 0,5 %  
bei sehr starker Verschmutzung 1,0 %

Konzentration	0,5%	1,0%
<b>Dosiersystem</b> (für 8 l Gebrauchslösung)		
Dosierpumpe (1 Hub = 20 ml)	2 Hübe	4 Hübe
Dosierschluss	2 Portionen	4 Portionen

Bei Verwendung anderer Mengen für Gebrauchslösung und Konzentration siehe Dosiertabelle.

## WARN- UND LAGERHINWEISE

Verdünnt anwenden!

**Blanchipon®** kühl, aber frostfrei, gut belüftet und trocken sowie für Kinder unzugänglich lagern! Beim Umgang mit dem Konzentrat Schutzhandschuhe und dicht schließende Schutzbrille tragen.

## EIGENSCHAFTEN

- kraftvolles, materialschonendes und hautverträgliches Reinigungsmittel für Flächen, Inventar und Instrumente
- löst starke organische Verschmutzungen, insbesondere Blut und Eiweiß
- frischer, nicht anhaftender Geruch
- biologisch abbaubar
- kalkwasserfest
- mischbar mit den Flächen-Desinfektionsmitteln Aldasan® 2000, Lysoformin® und Trichlorol®

## BESONDERE HINWEISE

Medizinprodukt sicher verwenden! Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

## VERSANDEINHEIT/PACKUNG

12 x 1000 ml-Flasche 6076  
2 x 5 Liter-Kanister 5025

### Zubehör

Dosierpumpe für 5 Liter-Kanister 3135  
(1 Hub=20 ml)

Sicherheitsdatenblatt und Betriebsanweisung sind unter [www.lysoform.de](http://www.lysoform.de) zu finden.

Haben Sie spezielle Fragen? Rufen Sie uns an!  
Wir rufen sofort zurück.

Vous avez des questions? Contactez-nous au numéro suivant –  
Nous vous rappellerions aussitôt!

D: 030 - 77 99 2-0  
CH: 056 - 441 69 81

# Mode d'emploi

à lire attentivement!

## Blanchipon®

Concentré  
Pour usage professionnel.

## COMPOSITION

Tensio-actifs anioniques (15–30 %)

## DOMAINES D'APPLICATION

- Nettoyage des surfaces lavables de toutes sortes tels que les revêtements de sols autres que les textiles, les escaliers, les corridors, les murs, le carrelage, les portes, les cadres de fenêtres, les radiateurs, l'équipement et les appareils, l'équipement sanitaire, les frigidaires etc.
- Nettoyage des cuisines

## MODE D'APPLICATION/DOSAGE

**Blanchipon®** est un concentré liquide, à partir duquel il est possible d'effectuer toute dilution souhaitée en ajoutant simplement de l'eau du robinet. Toujours remplir le seau d'eau d'abord, et ajouter **Blanchipon®** ensuite.

### Nettoyage des surfaces

En cas de souillure normale, même sèche 0,5 %  
En cas de souillure très importante 1,0 %

Concentration	0,5%	1,0%
<b>Système de dosage</b> (pour 8 l de solution)		
Pompe doseuse (1 pression = 20 ml)	2 pressions	4 pressions
Bouchon doseur	2 pressions	4 pressions

Si d'autres quantités de solution prête à l'emploi et d'autres concentrations sont nécessaire, voir le tableau doseur.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI/STOCKAGE

Utiliser sous forme diluée et hors seulement!

Conserver **Blanchipon®** au sec et au frais, mais à l'abri du gel, bien ventilé et hors de la portée des enfants! Utiliser gants de protection et des lunettes de protection hermétiques pendant la manipulation du concentré.

## PROPRIÉTÉS

- Détergent puissant, non-agressif pour les matériaux et la peau pour nettoyer les surfaces, l'équipement et l'instrumentation
- Dissout les souillures organiques importantes, surtout le sang et l'albumine
- Odeur fraîche, non pénétrante
- Biologiquement dégradable
- Résiste à l'eau calcaire
- Peut être mélangé aux désinfectants pour surfaces telles que Aldasan® 2000, Lysoformin® et Trichlorol.

## REMARQUES PARTICULIÈRES

Utilisez les dispositifs médicaux en toute sécurité!

Lisez l'étiquette et la documentation avant leur utilisation!

## CONDITIONNEMENT/UNITÉS DE TRANSPORT No. d'article

12 x 1000 ml (flacons) 6076  
2 x 5 litres (bidons) 5025

### Accessoires

Pompes doseuses pour bidons de 5 l 3135  
(1 pression = 20 ml)

La fiche de sécurité et les instructions d'emploi figurent sur le site [www.lysoform.de](http://www.lysoform.de)



## Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH

Kaiser-Wilhelm-Str. 133, 12247 Berlin  
Telefon 030 - 77 99 2-0, Telefax 030 - 77 99 2-269  
[www.lysoform.de](http://www.lysoform.de), e-mail: [kontakt@lysoform.de](mailto:kontakt@lysoform.de)

## LYSOFORM

Schweizerische Gesellschaft für Antisepsie AG  
Postfach 444, 5201 Brugg/Windisch  
Telefon 056 - 441 69 81, Telefax 056 - 442 41 14  
[www.lysoform.ch](http://www.lysoform.ch)